



**Automobilumrüstung
für Behinderte GmbH**

Gaspedalverlegung stehende Anordnung



- wahlweise rechts oder links Gas geben
- leichtes entfernen der Gaspedalverlegung
- Originalgaspedal wird nicht entfernt

Eine Gaspedalverlegung nach links ist für Personen geeignet, bei denen das rechte Bein in seiner Funktion eingeschränkt ist, oder nicht vorhanden ist.

Sie können mit Hilfe dieses Zusatzgerätes mit dem linken Fuß das Gaspedal betätigen.

Bei der Gaspedalverlegung -stehende Anordnung- ist zu beachten, dass vor das Originalgaspedal eine Fußgassperre angebracht wird und dadurch Platz für das rechte Bein verloren geht. (ca. 4 -5 cm)

Die Pedalverlegung wird mittels Bodenplatte, welche auf dem Fahrzeugboden befestigt ist, gehalten. Mit dem linken Fuß wird das Zusatzpedal betätigt und über ein Gestänge synchron auf das Originalgaspedal eingewirkt. Das Originalgaspedal ist durch die vorgebaute Fußgassperre gegen unbeabsichtigtes Gas geben geschützt.

Ein entfernen der Gaspedalumlegung kann mit wenigen Handgriffen erfolgen, so dass auch Fahrer ohne Behinderung das Originalgaspedal wieder benutzen können. Die Abnahme des Gerätes von der Bodenplatte ist durch lösen einer Rändelschraube werkzeuglos möglich.

Fahrzeuge mit Automatik – Getriebe sind für eine Gaspedalverlegung nach links Voraussetzung.



AfB GmbH
Maurerstr. 6
30916 Isernhagen
Tel.: 05136-8794-40
Fax: 05136-8794-42
www.afb-rehamobil.de
e-mail: info@afb-rehamobil.de

